



Om dine høreværn eller ørepropper

Denne instruktion er lavet for at hjælpe dig med at lære dit nye høreværn/ørepropper at kende. Hvis du følger disse instruktioner, vil det sikre dig ubesværet brug af dit høreværn. Høreværnet er produceret og tilpasset til dine øre, og kan derfor kun anvendes af dig.

Isætning af høreværn øreprop

For at sætte høreværnet i øret, placeres spidsen mod øregangens åbning med udvendig bue pegende fremad (øregangen drejer normalt bagud og let opad) skub høreværnet ind i øret og roter evt. høreværnet indtil det mærkes at høreværnet falder på plads. For at tage høreværnet ud, skubbes høreværnet bagud og opad således at det slipper øregangen, hvorefter det fjernes fra øret. Da øregangen kan variere i form og størrelse, kan det være nødvendigt med special vejledning.

Kontakt Audiovox, hvis der opstår besværligheder med anvendelsen af høreværnene/ørepropperne.





Sidemarkering

Høreværnet/øreproppen er forsynet med en sidemarkering i øreproppen, således at man umiddelbart kan se, om høreværnet er til højre eller venstre øre. For højre øre ses en **red** markering og for venstre en **blå** markering

Brug af cremer

Det anbefales at bruge enten Elacin eller Otoferm creme, denne sikre en behagelig isætning af proppen, bedre tætning i øret samt forhindre udtørring af øregangen.

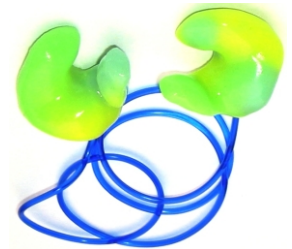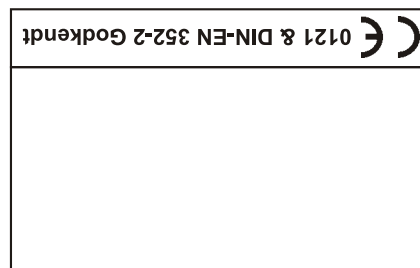

Dit høreværn/øreprop vil fungere fejlfrit i mange år, hvis det behandles med omtanke og beskyttes mod stød, fald, fugt og kraftig varme. Brugen af hårspray bør undgås på alle typer propper, når disse bæres. Øreproppen holdes ren ved at tørre den af i en blød klud eller serviet, rens gerne proppen i lunken sæbevand. Høreværnet/øreproppen må *aldrig* tørres med en hårtørrer eller i en eller mikrobølgeovn.

Generelle råd om daglig vedligeholdelse

Produktet overholder alle europæiske krav og standarder

Produktinformation

ny høreværn. Ønsker dig god fornøjelse med dit vores adresse eller pr. telefon. Vi velkommen til at kontakte os på eller har du spørgsmål, er du altid problemet med dit høreværn, Skulle du mod forventning få

Hvis problemer og spørgsmål

Ndr. Frhavgade 49
2100 Kbh. Ø Tlf. 39 40 10 50
www.audiovox-lab.dk
e-Mail: info@audiovox-lab.dk



Svømmeørepropper

Soveørepropper

Ørepropper

Høreværn

Brugsanvisning